

CorrectFit en Tel-O-Graph manchet

bloeddruk meten op maat

Bloeddrukmanchetten zijn een belangrijk onderdeel van de bloeddrukmeting. Naast het kiezen van de correcte manchetmaat en het op de juiste manier aanleggen, is het comfort voor de drager (patiënt) belangrijk.


De bloeddrukmanchet dient 2 cm boven de elleboog te worden aangelegd. Door een vinger tussen bloeddrukmanchet en arm te steken kan men controleren of de manchet te los of te strak zit.

De juiste vastgestelde maten volgens de BHS-richtlijnen zijn: XS (14-20 cm), S (20-24 cm), M (24-32 cm), L (32-38 cm) en XL (38-55 cm).

Bloeddrukmetingen bij mensen met een hoge bloeddruk kunnen onaangenaam, soms zelfs pijnlijk zijn, door de hoge mmHg druk die gebruikt wordt. De speciaal ontwikkelde CorrectFit en Tel-O-Graph bloeddrukmanchet garandeert een betere pasbaarheid en minder pijnlijke inflaties, vooral tijdens gebruik aan stevige c.q. dikkere bovenarmen.


De CorrectFit en Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn (m.u.v. de XL-maat) zogenaamde éénhandmanchetten en daardoor eenvoudig door de drager zelf aan te leggen. Door de speciale 105° hoek van de beugel wordt een betere pasbaarheid gegarandeerd.

De CorrectFit en de Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn vervaardigd van 100% Polyamide. De manchetten zijn wasbaar (30°C) waardoor de hygiëne wordt verhoogd en de duurzaamheid wordt verlengd. De CorrectFit manchetten zijn Latex-, PVC- en DEHP-vrij.

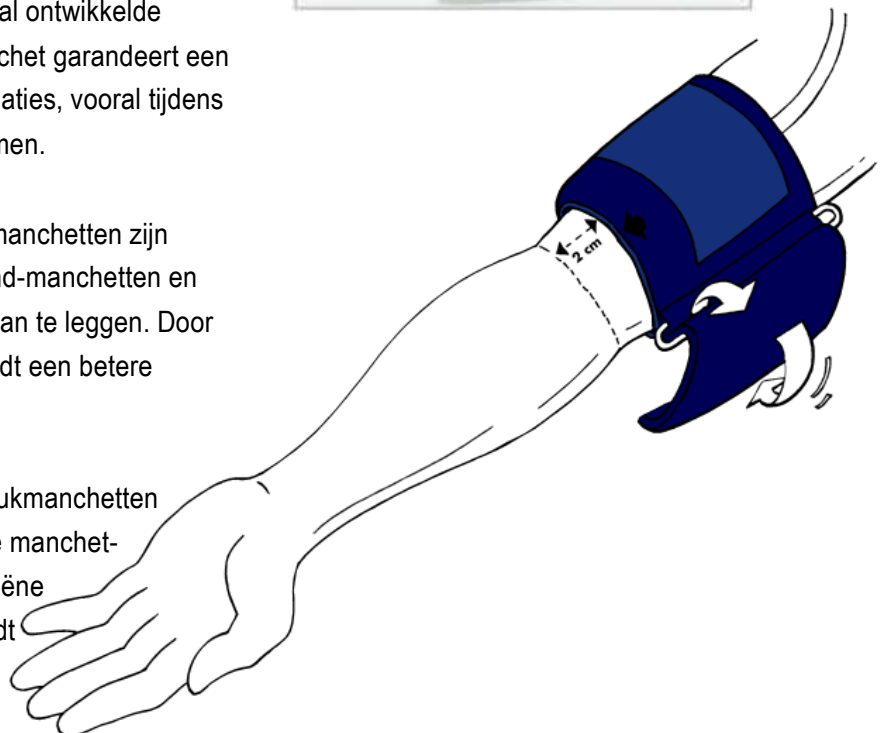

CorrectFit Bloeddrukmanchetten

De **CorrectFit** bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van het 24-uur **ABPM Mobil-O-Graph®** systeem. De maatvoering is conform de BHS* richtlijnen. De bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van de BHS/ESH** validatie van het 24-uur ABPM Mobil-O-Graph® systeem.

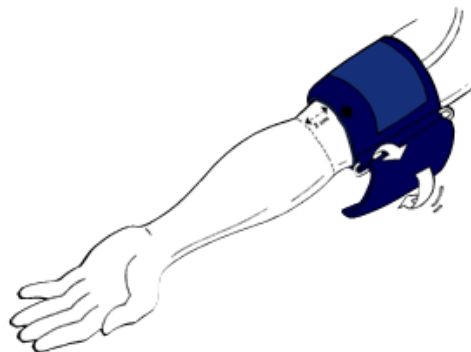

Bestelnummers

111001	CorrectFit XS	(14-20 cm)
111002	CorrectFit S	(20-24 cm)
111003	CorrectFit M	(24-32 cm)
111004	CorrectFit L	(32-38 cm)
111005	CorrectFit XL*	(38-55 cm)
111010	Meetlint bovenarm	


* De CorrectFit XL manchet is geen één-hand-manchet. Deze manchet is niet voorzien van een beugel.

Alle CorrectFit bloeddrukmanchetten zijn voorzien van een 130 -135 cm lange slang.

Door middel een metalen koppelstuk wordt de bloeddrukmanchet aan de ABPM gekoppeld. Door de extra verstevigde aansluiting van slang naar blaaskussen wordt de kans op afknikken geminimaliseerd. Het speciale roterende koppelstuk garandeert een stabiele verbinding met de ABPM monitor (Mobil-O-Graph®).

Tel-O-Graph Bloeddrukmanchetten

De **Tel-O-Graph** bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van het **Tel-O-Graph®** systeem. De maatvoering is conform de BHS* richtlijnen. De bloeddrukmanchetten zijn onderdeel van de BHS/ESH** validatie van het Tel-O-Graph® systeem.

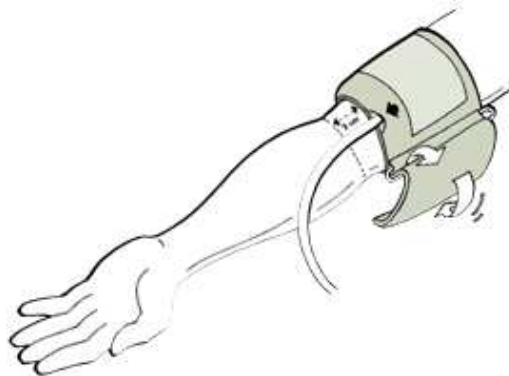

Bestelnummers

111037	Tel-O-Graph S	(20-24 cm)
111038	Tel-O-Graph M	(24-32 cm)
111039	Tel-O-Graph L	(32-38 cm)
111040	Tel-O-Graph XL	(38-55 cm)

Alle Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn voorzien van een 80 - 85 cm lange verbindingsslang.

* British Hypertension Society
** European Society of Hypertension

Reiniging en onderhoud is belangrijk! Wij adviseren uw manchetten na elk gebruik te reinigen. Zowel de CorrectFit als ook de Tel-O-Graph bloeddrukmanchetten zijn wasbaar (30 °C, niet in de droger, niet strijken). Haal het blaaskussen uit de hoes voordat u reinigt! Let u er op, dat u na reiniging de juiste maat blaaskussen in de juiste maat hoes terug stopt.



CardioVasculair B.V.
Postbus 1008, 5900 BA VENLO

Tel. : (+31) - (0)77 - 475 4891
Fax : (+31) - (0)77 - 475 4893
KvK-nr. : 55775462
BTW-nr. : NL851855593B01

info@cardiovasculair.net
www.cardiovasculair.net

Rabobank : 3106.53.878
IBAN : NL23RABO0310653878
BIC : RABONL2U