

De CorrectFit bloeddrukmanchet wordt aan de bovenarm aangelegd. De juiste positie van de bloeddrukmanchet is:

- > 2 cm boven de elleboog
- > klittenbandsluiting aantrekken totdat manchet aan zit
- > door een pink tussen bovenarm en manchet te steken kan men controleren of de manchet strak genoeg zit.





LET OP dat de manchet niet té strak zit! Een te losse manchet zal gaan verschuiven, een te strakke manchet geeft een pijnlijke meting!

- > de luchtslang van de CorrectFit manchet moet naar boven wijzen, daar hij over de schouders van rechts naar links (v.v.) naar het ABPM-systeem loopt

Juiste maat manchet bepalen:
Wanneer de metalen doorvoerbeugel van de manchet in het gebied tussen de 2 witte lijnen uitkomt en een pink tussen bovenarm en manchet gestoken kan worden, is de juiste maat manchet gebruikt en zit de manchet goed.

Tip:
Laat uw patiënt de bloeddrukmanchet desnoods een paar keer zelf aanleggen en controleer de positie om de arm. Controleer het aantrekken van de manchet. Op deze wijze kan de patiënt, indien nodig, de manchet zelf opnieuw aanleggen.

CorrectFit manchetten reiniging van

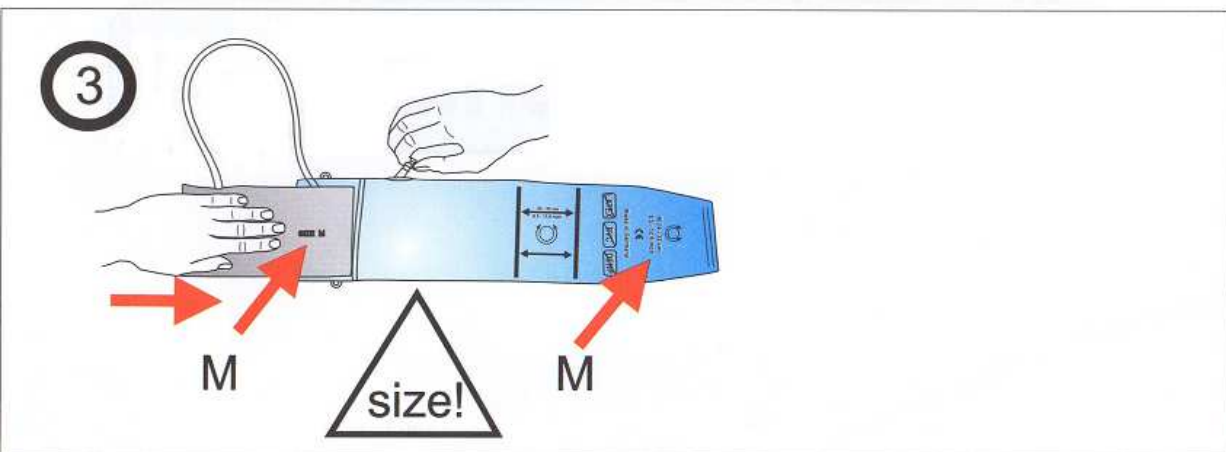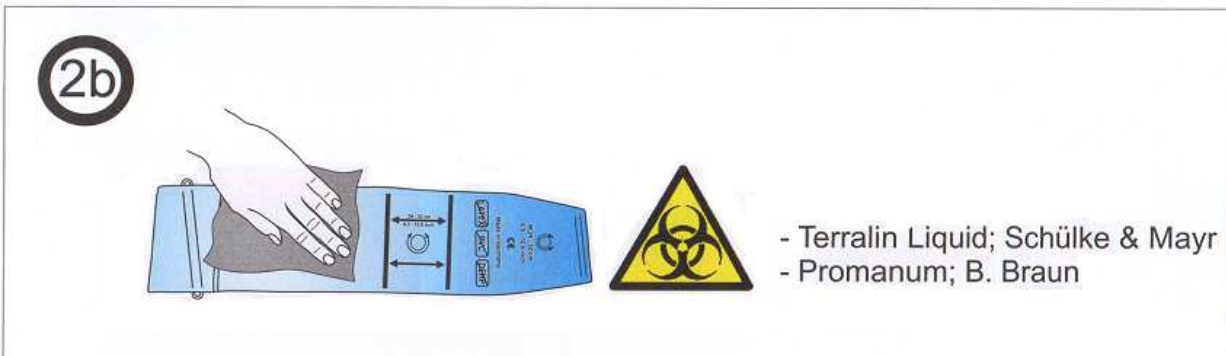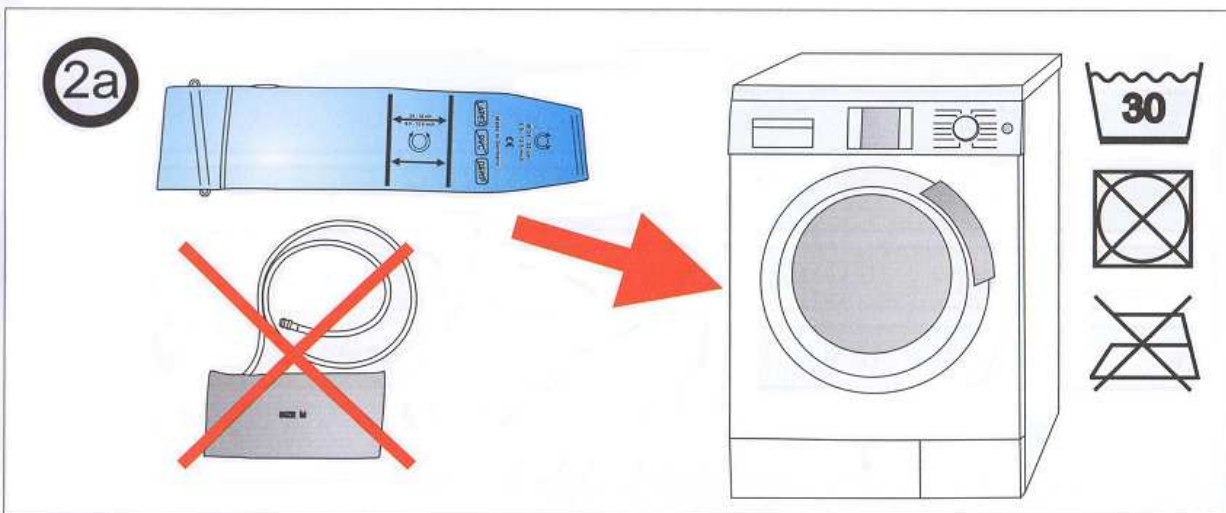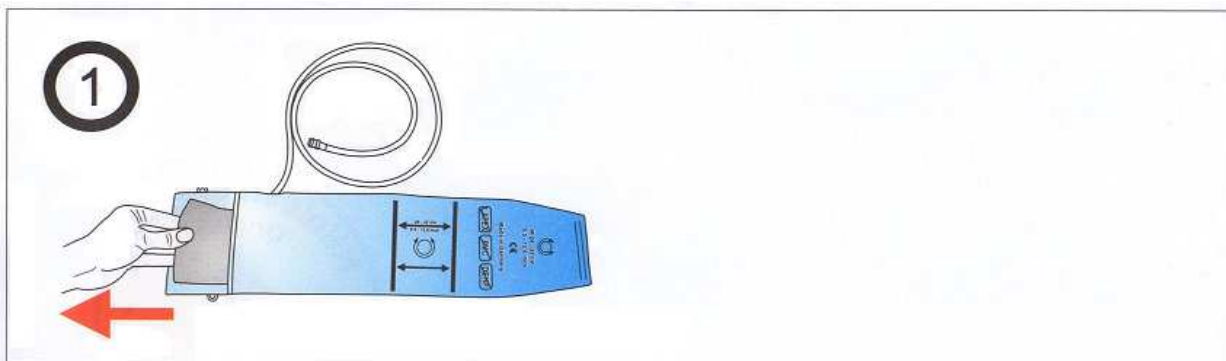

CardioVasculair B.V.
Postbus 1008, 5900 BA VENLO

Tel. : (+31) - (0)77 - 475 4891
Fax : (+31) - (0)77 - 475 4893
KvK-nr. : 55775462
BTW-nr. : NL851855593B01

info@cardiovasculair.net
www.cardiovasculair.net
www.sensewear.nl

Rabobank : 3106.53.878
IBAN : NL23RABO0310653878
BIC : RABONL2U